


Cihazın tanımı

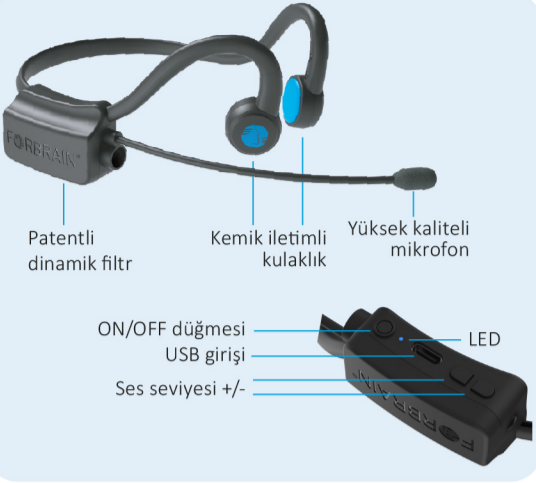

Aksesuarlar



Bileşenler

- Kemik iletimli kulaklık
- Yüksek hassasiyetli mikrofon
- Kontrastlı bir duyum yaratmak için dinamik filtre
- Elde tutularak kullanılabilen ikinci mikrofon
- Çift uçlu jak girişi

Ses, mikrofon tarafından kaydedilerek kontrastlı bir duyum yaratmak için eşzamanlı olarak dinamik filtre tarafından işlenmek suretiyle kemik iletimli mikrofon aracılığıyla iki taraftaki şakak kemiklerine iletilir.

Nasıl takılır?

Kasnağı başın arkasında ense üzerinde konumlandırınız ve kulaklıkları kulaklara değil kulağın önündeki kemiklere yerleştiriniz. Mikrofonun ağzın önünde, en az 3 cm / 1,2 inç mesafede durması gerekir. Mikrofonu ağza çok yakın yerleştirmek Larsen etkisine neden olabilir.



Bilgisayar / telefon bağlantısının yapılması

Çift uçlu jak girişini kullanarak, Forbrain aygıtınızı bilgisayarınıza ya da telefona bağlayınız. Harici ses kaynağına yapılan bu bağlantı, egzersizlerin yapılması veya çevrimiçi seansların gerçekleştirilmesi amacıyla taşınmaktadır. Bu durumda, ses kaynağının güçlendirilerek, ancak filtrelenmeden iletileceğini unutmayınız.



El mikrofonunun bağlanması

Siyah kutunun ön kısmında bulunan girişi kullanarak, Forbrain aygıtını el mikrofonuna bağlayınız. El mikrofonu, egzersizlerin anne-baba veya eğitmen desteğiyle yürütülmesi için kullanılabilir. El mikrofonu, kullanıcının elinde, ağza 5 cm mesafede tutularak kullanılmalıdır. Bu durumda, mikrofonu kullanan kişinin sesi de işlenilerek iletilecektir.



Nasıl şarj edilir?



FORBRAİN'ın PC'nizdeki standart USB girişine veya USB şarj kablosuyla bir duvar şarj aletine bağlayınız. Forbrain 3 saatte tamamen şarj olur. LED ikaz ışığı şarj esnasında kuvvetli kırmızı bir ışık verir ve şarj işlemi bittiğinde maviye döner.

LED gösterge lambası

Renk	Durum
Mavi	Normal çalışma modu
Mavi ışık sönüyor ve cihaz kapanıyor	Pil çok zayıf
Kırmızı	Kulaklık şarj oluyor
Kırmızı ışık söner	Şarj işlemi tamamlandı

Sorun giderme

Sorun	Çözümü
Kulaklık takımı açılmıyor	Bataryanın tam olarak şarj edilmediğini kontrol ediniz. Şarjı yoksa, bataryayı şarj ediniz.
Kendi sesimi duymuyorum, veya ulaşan ses düzeyi çok yüksek.	Ses iletim parçalarının yerleşimini, mikrofonun konumunu ve ses düzeyini kontrol ediniz. Ses iletim parçalarını doğru şekilde yerleştiriniz ve varsayılan ses düzeyine geçiş yapılması için aygıtı kapatıp tekrar açınız. Ardından, ses düzeyini istediğiniz noktaya ayarlayınız.
Kendi sesimi duyarken, ses düzeyinde iniş çıkışlar fark ediyorum.	Bu bir sorun değildir ve sesinizi gerçek zamanlı olarak işleyen dinamik ses filtresinin işleyişi nedeniyle meydana gelmektedir.

Teknik özellikler

Kulaklık türü	Çift süspansiyonlu kemik iletimli
Hassasiyet	100 ± 3dB
Mikrofon türü	Elektretli kondansatör
Hassasiyet	-60dB ± 3dB
Çalışma süresi	altı saate kadar
Şarj süresi	Yaklaşık üç saat (USB kablosuyla)
Ağırlık	60gr
Renk	Siyah, renkli kulaklıklar
Kutu ebatları	190x165x63mm

Saklama ve bakım

- Kulaklığı serin ve kuru yerde saklayınız. Sıcaklık 5~30°C (41~86°F) arasında olmalıdır. Sıcak/soğuk bir ortamda veya çok rutubetli bir bölgede çalışmak pilin ömrünü azaltır. After storage for a long period, please charge the headset before using again.
- Kulaklık suya dayanıklı değildir. Kulaklığı suya koymayınız.
- Kulaklığı yumuşak ve kuru bir bezle temizleyiniz.
- Sivri cisimlerle temas ettirmeyiniz.

Note:

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Ürünle ilgili daha fazla bilgi için www.pronounce.com adresini ziyaret ediniz.

FCC Uyarısı


Bu cihaz FCC yönetmeliğinin 15. bölümündeki şartlara uymaktadır. Çalışması aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) bu cihazın zararlı parazitlere yol açmaması gerekir ve
- (2) bu cihazın, istenmeyen bir işleyişe neden olabilecek olanlar dahil her türlü diğer paraziti de kabul etmesi gerekmektedir.

Seri numarası nerede bulunur?



Seri numarası

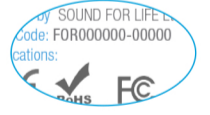

Kullanım tedbirleri, sınırlar ve sorumluluk reddi

Çok zayıf veya aşırı duyarlı işitme gibi ender istisnalar dışında FORBRAİN'ın ses seviyesini değiştirmek gerekmez. Ses çok açmaktan kaçınınız. Amplifikasyonun rahatsızlık vermemesine dikkat ediniz. FORBRAİN'ı kullanan bütün çocuklar devamlı bir yetişkinin gözetimi altında tutulmalıdır. Forbrain küçük parçalar içerir. PRONOUNCE 5 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. FORBRAİN'ın günde iki saatten fazla kullanmayınız. Acı veya rahatsızlık hissederseniz PRONOUNCE'u kullanmayı derhal bırakınız. FORBRAİN'ı kullanmaya kendinizi iyi hissettiğinizde devam ediniz. Forbrain elektrikli bir cihazdır, dikkatle kullanınız. Forbrain pedagojik bir cihazdır. Amerikan Federal İlaç İdaresi veya başka bir düzenleyici sağlık kurumu tarafından onaylanmış değildir. Tıbbi cihaz olarak veya başka bir tıbbi cihazın aksesuarı şeklinde kullanılamaz.

Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

SEÇMEN DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ

Bağdat Caddesi. No: 504 Pk: 34744 Bostancı / Kadıköy / İstanbul / TÜRKİYE

Telefon:

+90(216) 467 26 27

E-mail: bilgi@siemarket.com

Bilginize:

Eğer bir ürünü garanti kapsamında iade etmek istiyorsanız lütfen şu adrese ayrıntılı bilgi gönderiniz: bilgi@siemarket.com



KC ID: R-R-SFL-29320-AA-NA